

novo



EVOLVE X

by **INMODE**



TITE | TONE | TRANSFORM

TRANSFORMAÇÃO CORPORAL TOTAL

*Tecnologia HANDS-FREE para
Body Sculpting e Tonificação Muscular*



TRANSFORMAÇÃO NÃO INVASIVA E HANDS-FREE

REMODELAÇÃO DA PELE,
TRATAMENTO DO TECIDO ADIPOSEO E
TONIFICAÇÃO MÚSCULAR



EvolveX é uma plataforma *hands-free* inovadora que **transforma totalmente o conceito de escultura corporal** (*Body Sculpting*) e leva-o para um patamar superior. Após a quarentena, os pacientes procuram cada vez mais tratamentos não-cirúrgicos e minimamente invasivos para remodelar a pele, tratar a gordura, esculpir o abdômen e melhorar os glúteos e as coxas.

EvolveX é o único sistema *all-in-one*, equipado com três tecnologias clinicamente comprovadas:

- » Tite (RF Bipolar)
- » Tone (Electroestimulação Muscular-EMS)
- » Transform (RF Bipolar + EMS)

Os procedimentos podem ser combinados para proporcionar um **tratamento sinérgico multicamadas único** que produz resultados transformadores e consistentes de **remodelação da pele, tratamento do tecido adiposo e tonificação dos músculos**.

A versatilidade das múltiplas modalidades do EvolveX permite **planos de tratamento personalizáveis e repetíveis** que vão ao encontro da procura dos pacientes por tratamentos não-cirúrgicos e com zero tempo de recuperação. O design *hands-free* e a tecnologia programável inteligente tornam o EvolveX um **equipamento ideal para respeitar o distanciamento social**, permitindo uma redução do contacto cara-a-cara entre o paciente e o médico durante os tratamentos.

Seja um participante ativo nesta crescente tendência do *Body Sculpting* não invasivo com EvolveX.

EVOLVE TITE

TRATAMENTO *HANDS-FREE* PARA REMODELAÇÃO DA PELE

Evolve Tite emite energia de radiofrequência (RF) bipolar sobre a rede fibroseptal para remodelar a pele e melhorar a sua aparência. **Os 8 aplicadores mãos-livres** transmitem um aquecimento volumétrico uniforme sobre a camada dérmica e subdérmica que produzem uma remodelação dos tecidos e uma redução circunferencial.

O algoritmo exclusivo do EvolveX proporciona segurança sem precedentes.

A energia de RF é automaticamente ajustada quando cada aplicador deteta que se atingiu a resposta térmica ideal.

Cada aplicador tem termosensores inteligentes de RF que foram programados para manter uma temperatura terapêutica eficaz para a contração cutânea e simultaneamente detetar e ajustar flutuações de temperatura de forma a garantir um aquecimento em massa consistente. A manutenção destas temperaturas terapêuticas ótimas estimula a neocolagénese.



EVOLVE TONE

TRATAMENTO *HANDS-FREE* PARA TONIFICAÇÃO DA PELE

Evolve Tone é uma tecnologia não invasiva de tonificação muscular que emite pulsos elétricos de baixa frequência (Eletroestimulação Muscular – EMS) que induzem contrações musculares involuntárias. A EMS otimiza o metabolismo celular e a regeneração das fibras musculares o que resulta numa aparência mais tonificada.

Os pacientes descansam confortavelmente enquanto o TONE atua sobre grupos musculares específicos, aumentando a sua força e redefinindo a sua aparência, sem perda de tempo na recuperação.

Os 4 aplicadores hands-free do TONE permitem que várias áreas do corpo sejam tratadas em simultâneo o que possibilita a personalização dos tratamentos. Ofereça aos seus pacientes a última tecnologia em tratamentos corporais personalizados.




EVOLVE TRANSFORM


TRATAMENTO *HANDS-FREE* TRANSFORMADOR CORPORAL TOTAL (PELE, TECIDO ADIPOSO E MÚSCULOS)

Evolve Transform proporciona dois tratamentos num único: Energia de radiofrequência (RF) bipolar para um aquecimento profundo da derme e do tecido adiposo alternada com eletroestimulação muscular (EMS). Este tratamento sinérgico multicamadas produz resultados transformadores consistentes.


Os 6 aplicadores hands-free do TRANSFORM distribuem o calor da energia de RF à rede fibroseptal e ao tecido adiposo, enquanto que a EMS induz contrações musculares forçadas que não são possíveis de conseguir com o exercício físico normal.

Evolve TRANSFORM reinventa o conceito de tratamento body sculpting e de tonificação muscular para todos os tipos de corpo, conseguindo resultados altamente eficazes e sem perda de tempo de recuperação.

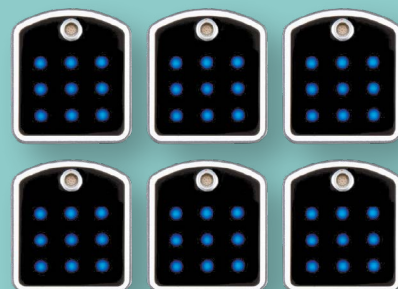

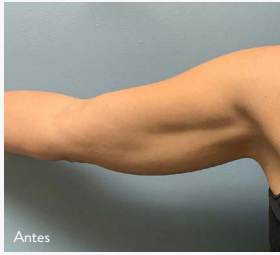

DR. D. KIBA

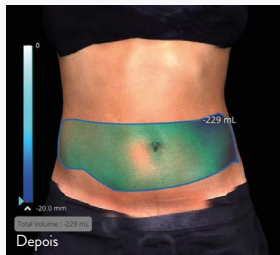

ANTES E DEPOIS COM QUANTIFICARE

DR. S. THEODOROU & DR. C. CHIA




DR. J. STUBBS



PERFIL DE SEGURANÇA SUPERIOR COM A TECNOLOGIA PROGRAMÁVEL INTELIGENTE

- » Indicadores visuais integrados iluminam-se à medida que cada aplicador atinge os parâmetros ótimos, dando atualizações constantes sobre o progresso do tratamento.
- » O ecrã de tratamento LCD do EvolveX permite que os médicos monitorizem visualmente o efeito de cada aplicador em qualquer altura do procedimento.
- » As tecnologias RF e EMS do EvolveX podem ser usadas com segurança e eficácia em todos os tipos de pele.
- » O EvolveX inclui um botão de chamada para que os pacientes possam interromper facilmente o tratamento, permitindo que a equipa clínica faça ajustes, se necessário.

| | |
|---------------------------------------|--|
| Potência de saída: | Até 50 W |
| Frequência de saída: | 1 MHz |
| Temperatura de corte: | Monitorização da temperatura em tempo real para todos os aplicadores ativos. Temperatura de corte ajustável até 43°C. |
| Tempos de tratamentos personalizados: | Incrementos de 5 minutos permitem que os procedimentos sejam totalmente adaptados às necessidades específicas de cada paciente |

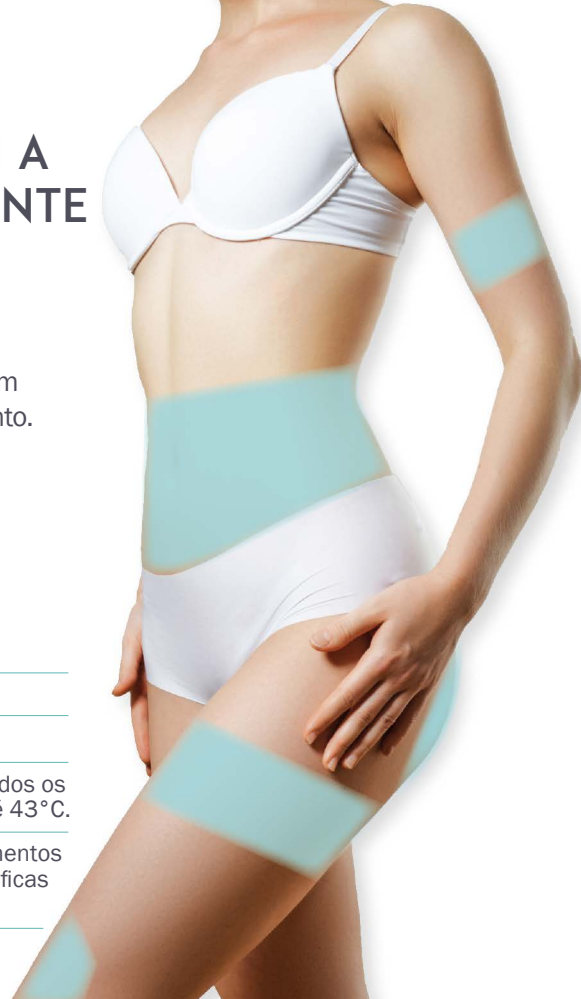

MAXIMIZE AS SUAS RECEITAS & RENTABILIDADE

- » O design **hands-free** e a tecnologia programável do EvolveX permitem que o tempo do médico possa ser redistribuído por outros pacientes e tratamentos, enquanto o EvolveX estiver a ser utilizado.
- » O EvolveX expande os seus serviços permitindo desenhar planos de tratamentos combinados a um leque alargado de pacientes. Com o EvolveX, tem a flexibilidade de oferecer procedimentos personalizados e repetíveis que geram novas fontes de receita recorrentes.
- » Três tecnologias eficazes, sem consumíveis, que aumentam a rentabilidade da sua clínica.

TRANSFORME TODOS OS TIPOS DE CORPO COM EVOLVEX




ECTOMORFO



MESOMORFO



ENDOMORFO

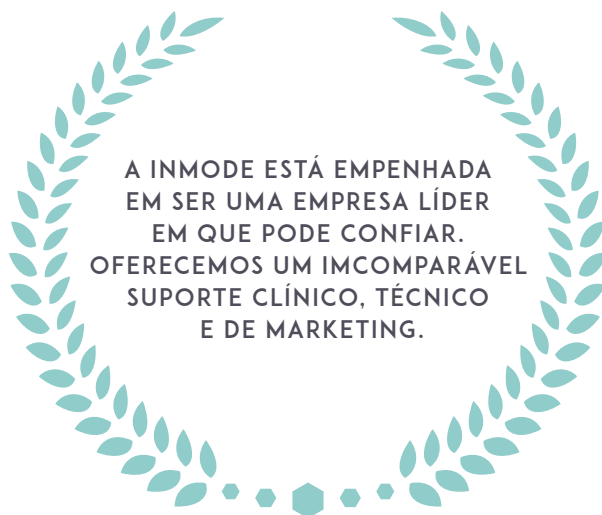

A INMODE ESTÁ EMPENHADA
EM SER UMA EMPRESA LÍDER
EM QUE PODE CONFIAR.
OFERECEMOS UM IMCOMPARÁVEL
SUPORTE CLÍNICO, TÉCNICO
E DE MARKETING.



+34 635 154 797 | WWW.INMODEMD.PT | INFOSPAIN@INMODEMD.COM